



TENA Flex Vyösuojan voi kiinnittää myös selkäpuolelta

TENA Tipsi
terveydenhuollon
ammattilaisille

MARRASKUUN TENA TIPSII

TENA Flex Vyösuoja on ainutlaatuisen ergonominen työväline hoitajalle sen helpon ja monipuolisen puettavuuden ansiosta. Suoja on täysin samanmuotoinen edestä ja takaa, joten sen voi pukea hoidettavalle joko etu- tai selkäpuolelta hoidettavan tilanteesta riippuen. TENA Flex Vyösuoja toimii hyvin ja istuu napakasti molemmin päin puettuna.

Tässä muutama vinkki TENA Flex Vyösuojan pukemiseksi selkäpuolelta:

- Kun potilas istuu vessassa tai portatiivilla, voi TENA Flex Vyösuojan pukemisen aloittaa kietaisemalla sen vyötäisille kuin esiliinan. Kun potilas sitten nousee hieman, saa suojan vedettyä etupuolelta potilaan jalkojen välistä selkäpuolelle.
- Jos potilas pyrkii itse avaamaan käyttämäänsä suojaa, kannattaa TENA Flex Vyösuoja kiinnittää hänelle selkäpuolelta. Tällöin suojan irrottaminen itse ei ole niin helppoa.

**LATAA TÄSTÄ TENA FLEX VYÖSUOJAN
PUKEMISOHJEET →**



Pukeminen
seistessä,
kiinnitys
takaa



Pukeminen
maatessa,
kiinnitys
takaa



Lue aiemmin ilmestyneet TENA Tipsit **TÄÄLTÄ**

1114_1122



Tietoa TENAsta

Yli 50 vuoden kokemuksen myötä TENAsta on tullut maailman johtava inkontinenssituotteiden valmistaja, joka tuottaa tuotteita ja palveluita yksittäisille ihmisille ja terveydenhuoltopalveluille 90 maassa.

Päämäärämme on vähentää inkontinenssin vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään ja tehdä asiakkaidemme arjesta sujuvaa ja laadukasta.

Lue lisää TENA:sta ›

TENA-sivustot

TENA tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja lukuisille ihmisille. Tutustu TENA-sivustoihin:

lights by TENA ›
TENA Lady ›
TENA Men ›
Läheisistä huolehtiminen ›
TENA Lapset ›
Terveystuotteiden ammattilaiset ›
TENA Kauppa ›

TENA asiakasrekisteri, Oy Essity Finland Ab, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Jos et halua vastaanottaa uutiskirjettä, klikkaa [tästä](#)

essity
TENA,
an Essity brand